


American Health Gate

ميزان حرارة إلكتروني قابل لإعادة الشحن

AHG-372

دليل التعليمات

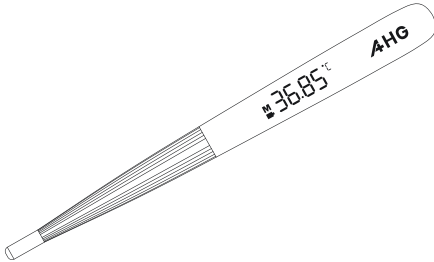

الإصدار: ١.٠

تاريخ التعديل: ٢٠٢٤-١٢-١٢

٣	مقدمة المنتج
٣	الاستخدام المقصود
٤	وصف الجهاز والمكونات
٤	الشاشة
٥	وضعية القياس الصحيحة
٥	تعليمات الاستخدام
٧	ملاحظات
٧	استدعاء السجل
٨	تعليمات الوصول إلى الميزان الحراري
٨	وضع الشحن
٩	استبدال بطارية صندوق الشحن
١٠	رسائل الخطأ
١٠	التنظيف والتطهير
١٢	ملاحظات الفحص والتنظيف
١٣	المواصفات الفنية
١٤	التصنيف
١٤	محتويات التسليم
١٤	احتياطات السلامة
١٦	فهرس الرموز
١٦	تعليمات التخلص
١٧	تعليمات السلامة الهامة
٢١	معلومات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)
٢٢	الوصف الفني
٢٦	الضمان


ميزان حرارة إلكتروني قابل لإعادة الشحن

شكرًا لشرائك ميزان الحرارة الإلكتروني القابل لإعادة الشحن AHG.

- للاستخدام الآمن والسليم لهذا المنتج، يرجى قراءة وفهم احتياطات السلامة في هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.
- قم بتخزينه بشكل صحيح لمنع فقدانه.
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الشركة المصنعة.

الاستخدام المقصود

- تم تصميم AHG-372 لقياس درجة حرارة جسم الإنسان عن طريق الإبط (تحت الذراع). وهو مخصص للاستخدام في البيئات السريرية والمنزلية.
- موانع الاستخدام: لا توجد.
 - المستخدمون المقصودون: للاستخدام من قبل المحترفين الصحيين المدربين أو الأشخاص العاديين باتباع التعليمات المناسبة.
 - بيئة الاستخدام المقصودة: المنزل أو البيئات السريرية.

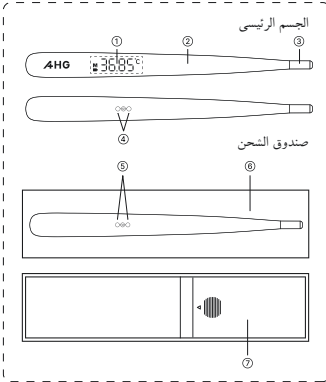

① الشاشة: توفر قراءات درجة الحرارة، استدعاء الذاكرة، حالة البطارية، رسائل الخطأ، ومؤشر الوضع.

② جسم الوحدة: الغلاف الرئيسي للميزان الحراري.

③ المسبار: يُستخدم لقياس درجة الحرارة.

④ منفذ الشحن: يُستخدم لإعادة شحن الميزان الحراري.

⑤ دبوس زنبركي: يتصل بالميزان الحراري لإعادة الشحن.

⑥ غطاء صندوق الشحن: يحتوي على البطاريات ويوفر الشحن للميزان الحراري.

⑦ غطاء البطارية: يؤمن بحجرة البطارية.

الشاشة



- رمز الذاكرة: يشير إلى استدعاء القياسات السابقة.
- رمز البطارية: يشير إلى انخفاض البطارية أو حالة الشحن.
- وحدة درجة الحرارة (°C): تشير إلى وحدة درجة الحرارة المختارة.
- قيمة درجة الحرارة: تعرض قراءة درجة الحرارة عند اكتمال القياس أو عند استدعاء قراءة مخزنة من الذاكرة.
- رمز التنبيه: يشير إلى وضع القياس السريع (التنبؤ).

قبل الاستخدام:



١. تأكد من شحن الميزان الحرارى بالكامل بوضعه فى صندوق الشحن.
٢. أبقِ الإبط مغلقاً لأكثر من ٥ دقائق قبل القياس للحصول على نتيجة أكثر دقة.
٣. قم بتنظيف الجهاز وإزالة أى عرق من الإبط قبل قياس درجة الحرارة.

الخطوات:

- ضع مسبار الميزان الحرارى فى وسط الإبط، مع التأكد من ملامسته للجلد.
- اضغط على المسبار برفق لأعلى وثبته بذراعىك.
- أبقِ ذراعىك قريبة من جسمك أثناء القياس للتأكد من تغطية المسبار بالكامل وعدم تعرضه للهواء.

تعليمات الاستخدام


١. خرج الميزان الحرارى من صندوق الشحن. سيتم تشغيله تلقائياً عندما يهتز. عندما يظهر "----" على الشاشة، يكون الميزان الحرارى جاهزاً للقياس.
- إذا كان الميزان الحرارى خارج صندوق الشحن ومغلقاً، قم بهزه لتشغيله ودخول وضع التنبؤ.



٢. اختيار وضع القياس

١-٢. القياس السريع (وضع التنبؤ)

ضع مسبار الميزان الحرارى تحت الإبط. سيتم الانتهاء من القياس فى حوالى ١٥ ثانية. سيهتز الميزان الحرارى ويعرض النتيجة. يمكنك بعد ذلك قراءة قيمة درجة الحرارة كما هو موضح أدناه:

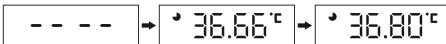

بمجرد اكتمال القياس التنبؤي، قم بهز الميزان الحرارى لإعادة تشغيل وضع القياس. ستظهر "----" على الشاشة:

٢-٢. القياس الدقيق (الوضع الفعلى)

لا تُخرج الميزان الحرارى بعد القياس السريع. سيدخل تلقائيًا فى وضع القياس الدقيق بعد حوالى ١٥ ثانية. سيتم الانتهاء من القياس الدقيق فى ٨ دقائق. سيهتز الميزان الحرارى ويعرض النتيجة، مما يتيح لك قراءة قيمة درجة الحرارة.

° 36.80 °C → 36.50 °C → ° 36.80 °C

بعد اكتمال القياس الفعلى، قم بهز الميزان الحرارى للدخول مرة أخرى فى وضع القياس. إذا هزرت الميزان الحرارى مرة أخرى خلال ٥ دقائق، سيدخل فى وضع القياس الفعلى. للدخول فى وضع التنبؤ، انتظر ٥ دقائق على الأقل أو ضع الميزان الحرارى فى صندوق الشحن لتشغيله قبل إخراجهِ للاستخدام.

٢-٣. نتيجة القياس

قيمة درجة الحرارة	العرض	التنبؤ/الاهتزازات
$T < 32.00^{\circ}\text{C}$	Lo °C	ثلاث مرات، اهتزازتان متتاليتان.
$32.00^{\circ}\text{C} \leq T < 37.50^{\circ}\text{C}$	بيانات القياس	ثلاث مرات، اهتزازتان متتاليتان.
$37.50^{\circ}\text{C} < T \leq 43.00^{\circ}\text{C}$	بيانات القياس ووحدة درجة الحرارة باللون البرتقالي.	ثلاث مرات، أربع اهتزازات متتالية.
$T > 43.00^{\circ}\text{C}$	Hi °C	ثلاث مرات، اهتزازتان متتاليتان.

٣. ضع الميزان الحرارى فى صندوق الشحن لبدء الشحن. سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند اكتمال الشحن.

ملاحظات:

- للحصول على قياس درجة الحرارة الأكثر دقة، استخدم وضع القياس الفعلى، والذي يستغرق حوالي ٨ دقائق.
- إذا كنت بحاجة إلى القياس مرة أخرى، يرجى الانتظار لمدة ٣ دقائق.


ملاحظات

- يحتوى الميزان الحرارى الإلكتروني القابل لإعادة الشحن على وضعين: الوضع المعدل والوضع المباشر. هذا الميزان الحرارى مخصص للاستخدام تحت الإبط. استخدامه فى موقع قياس غير صحيح قد يؤدي إلى قراءات غير دقيقة.
- قبل القياس، تجنب الأنشطة مثل الأكل، شرب المشروبات الساخنة أو الباردة، التدخين، التمارين الشاقة، الإجهاد العاطفى، أو الاستحمام. استرح لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل إجراء القياس.
- الحركة أثناء القياس قد تؤدي أيضًا إلى قراءات غير دقيقة.
- إنهاء القياس مبكرًا أو القياس لفترة قصيرة جدًا يمكن أن يؤدي إلى أخطاء، مع عرض الرمز "Er °C".
- بالنسبة لقياسات درجة حرارة الإبط، قد يؤدي التعرق أو عدم تغطية مستشعر درجة الحرارة بشكل كامل إلى قراءات أقل.
- عند مقارنة ميزانين حراريين، حتى لو كان هامش الخطأ متشابهًا، قد يتم تسجيل درجات حرارة مختلفة بسبب طرق القياس المختلفة.
- عند نقل الميزان الحرارى من بيئة عالية الرطوبة أو ذات درجة حرارة منخفضة إلى بيئة درجة حرارة التشغيل، اتركه ليتأقلم لمدة ٣٠ دقيقة قبل الاستخدام.

استدعاء السجل

بعد قياس ناجح، سيتم إيقاف تشغيل الميزان الحرارى تلقائيًا. سيتم عرض آخر قيمة قياس مسجلة عند تشغيل الميزان الحرارى مرة أخرى.

١. ضع الميزان الحرارى فى صندوق الشحن مع توجيه منفذ الشحن لأسفل، كما هو موضح أدناه.

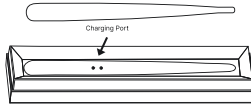

٢. اضغط برفق على الطرف القريب من شاشة العرض لإخراج الميزان الحرارى، كما هو موضح أدناه.



وضع الشحن

١. إذا أظهر الميزان الحرارى رمز بطارية منخفضة " ■ " على الشاشة، أو لم يكن هناك عرض (حتى بعد هز الميزان الحرارى)، أعدده إلى صندوق الشحن لإعادة الشحن.



(لا يوجد عرض)



(بطارية منخفضة)

٢. عند وضع الميزان الحرارى فى صندوق الشحن، سيظهر رمز الشحن " ■ " على الشاشة ويومض حتى يتم الشحن بالكامل. بمجرد اكتمال الشحن، ستتطفئ الشاشة.



(بعد الشحن الكامل)




(الشحن)

ملاحظات:

- تعتمد عمر البطارية على تكرار الاستخدام ومدته. إذا استنفدت البطارية بشكل غير عادي، استبدلها أو اتصل بدعم الصيانة.
- في الظروف القصوى، قد تتسرب البطارية بسائل تآكلي. إذا لامس الجلد أو العينين، اشطفه فورًا بالماء واطلب العناية الطبية.


استبدال بطارية صندوق الشحن

إذا أظهر صندوق الشحن رمزًا برتقاليًا "■" أو لم يكن هناك عرض، استبدل بطاريات صندوق الشحن.

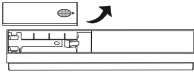


الخطوة ١:

افتح حجرة البطارية بالضغط وتحريك غطاء البطارية في الاتجاه المشار إليه.

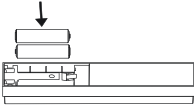

الخطوة ٢:

أدخل بطاريتين (٢) AAA، مع التأكد من محاذاة الأطراف الإيجابية (+) والسلبية (-) بشكل صحيح.

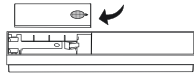

الخطوة ٣:

أعد غطاء البطارية إلى مكانه بإحكام.

ملاحظات هامة:

- استخدم دائمًا نفس النوع أو العلامة التجارية للبطاريات.
- تأكد من محاذاة أطراف البطارية بشكل صحيح أثناء التثبيت.
- أزل البطاريات إذا لم يتم استخدام الميزان الحراري لفترة طويلة (أكثر من شهر).

رسالة الخطأ	الحل
لا يستجيب (لا يمكن تشغيله)	اشحن الميزان الحرارى أو استبدل بطاريات صندوق الشحن.
العرض  أثناء الاستخدام	تم اكتشاف بطارية منخفضة. يرجى شحن الميزان الحرارى.
الرمز  باللون البرتقالى	صندوق الشحن يحتوى على بطارية منخفضة. يرجى استبدال بطاريات صندوق الشحن.
Hi°C	درجة الحرارة المقاسة تتجاوز ٤٣,٠٠ درجة مئوية.
Lo°C	درجة الحرارة المقاسة أقل من ٣٢,٠٠ درجة مئوية.
Err	خلل فى المستشعر. يرجى التواصل مع بائع التجزئة الخاص بك.
Er°C	لم يكتمل القياس السريع. يرجى إعادة القياس.
"Er°C" - XX.XX°C	إذا كان القياس غير مكتمل فى وضع القياس، سيظهر "Er°C"، متبوعًا بالقيمة المتوقعة.

التنظيف والتطهير

التطهير

يجب تطهير سطح الجهاز فوراً بعد الاستخدام فى بيئات معرضة لخطر العدوى كما يلى:

١) مسبار درجة الحرارة:

- امسح سطح المسبار برفق باستخدام قطعة قطن مبللة قليلاً بكحول طبي بنسبة ٧٠٪-٨٠٪ لمدة ٢٠ ثانية.
- امسح فوراً بقطعة قطن نظيفة وجافة لمدة ٢٥ ثانية.
- بعد التطهير، اترك ما لا يقل عن ٥ دقائق للتجفيف قبل استخدام الميزان الحرارى مرة أخرى.
- تأكد من أن المسبار نظيف وجاف. تجنب لمس المسبار إلا عند الحاجة إلى التنظيف.
- إذا كان المسبار تالفًا، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.

٢) لميزان الحرارى وصندوق الشحن:

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بكحول طبي بنسبة ٧٠٪-٨٠٪ لتطهير شاشة الميزان الحرارى أو صندوق الشحن والسطح الخارجى لمدة ٣٠ ثانية.
- امسح فوراً بقطعة قماش ناعمة ونظيفة لمدة ٣٥ ثانية.
- اترك ما لا يقل عن ٥ دقائق للتجفيف قبل قياس درجات الحرارة.
- تأكد من أن الشاشة والسطح الخارجى نظيفان وجافان.

التنظيف

يجب تنظيف سطح الجهاز فوراً بعد الاستخدام فى درجة حرارة الغرفة كما يلى:

١) مسبار درجة الحرارة:

- امسح سطح المسبار برفق باستخدام قطعة قطن مبللة قليلاً بكحول طبي بنسبة ٧٠٪-٨٠٪ لمدة ١٥ ثانية.
- امسح فوراً بقطعة قطن نظيفة وجافة لمدة ٢٠ ثانية.
- اترك ما لا يقل عن ٥ دقائق للتجفيف قبل قياس درجات الحرارة.
- تأكد من أن المسبار نظيف وجاف. تجنب لمس المسبار إلا عند الحاجة إلى التنظيف.
- إذا كان المسبار تالفاً، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.

٢) لميزان الحرارى وصندوق الشحن:

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بكحول طبي بنسبة ٧٠٪-٨٠٪ لتنظيف شاشة الميزان الحرارى أو صندوق الشحن والسطح الخارجى لمدة ٢٠ ثانية.
- امسح فوراً بقطعة قماش ناعمة ونظيفة لمدة ٢٠ ثانية.
- اترك ما لا يقل عن ٥ دقائق للتجفيف قبل قياس درجات الحرارة.
- تأكد من أن الشاشة والسطح الخارجى نظيفان وجافان.
- إذا كان الجهاز تالفاً، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.

فحص سطح الجهاز: تأكد من أن الجهاز نظيف بشكل واضح قبل وبعد كل استخدام.

ملاحظات هامة:

- لا تستخدم عوامل تنظيف كاشطة أو محاليل مطهرة غير موصى بها.
- لا يمكن تنظيف المنتج أو صيانته أثناء الاستخدام.
- إذا تم استخدامه من قبل عدة مرضى، فإن التنظيف والتطهير ضروريان. يجب تكرار الخطوتين ١ و ٢ قبل وبعد كل استخدام.
- المنتج ليس مقاومًا للماء. لا تغمر الميزان الحرارى فى الماء أو السوائل الأخرى. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة.
- استخدم فقط طرق التنظيف والتطهير الموصى بها. لا تستخدم طرقًا غير موصى بها.
- إذا كان المسبار تالفًا، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.
- إذا كان صندوق الشحن تالفًا، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.

التخزين

قم بتخزين الميزان الحرارى فى الظروف التالية:

- درجة الحرارة: من -٢٠ درجة مئوية إلى ٥٥ درجة مئوية
- الرطوبة النسبية: من ١٥٪ إلى ٩٣٪ رطوبة نسبية
- الضغط الجوى: من ٧٠ إلى ١٠٦ كيلو باسكال.
- لا تعرض الميزان الحرارى لأشعة الشمس المباشرة، أو درجات الحرارة العالية، أو الرطوبة، أو الغبار الناعم، أو اللهب، أو الاهتزاز، أو الصدمات.
- إذا لم يتم استخدام الميزان الحرارى لفترة طويلة، أزل البطارية.
- احتفظ بالميزان الحرارى دائمًا بعيدًا عن متناول الأطفال.

المعايرة

- تمت معايرة هذا المنتج وقت التصنيع. عند استخدامه وفقًا للتعليمات، لا يتطلب معايرة دورية.
- إذا كانت لديك مخاوف بشأن دقة قياسات الميزان الحرارى، يرجى التواصل مع ممثل الخدمة لدينا للحصول على المساعدة.
- يمكن العثور على تاريخ التصنيع على الملصق الموجود على الجهاز.

اسم الجهاز	ميزان حرارة إلكتروني قابل لإعادة الشحن
الطراز	AHG-372
وضع القياس	وضع الإبط الوضع المعدل (القياس التنبؤي) الوضع المباشر (القياس الفعلي)
وحدات القياس	درجة مئوية (C°)
ظروف التشغيل	من ٥ درجات مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية، من ١٥٪ رطوبة نسبية إلى ٨٠٪ رطوبة نسبية
ظروف النقل والتخزين	من -٢٠ درجة مئوية إلى ٥٥ درجة مئوية، من ١٥٪ رطوبة نسبية إلى ٩٣٪ رطوبة نسبية، من ٧٠ كيلو باسكال إلى ١٠٦ كيلو باسكال
موقع القياس	الإبط
موقع الجسم المرجعي	الإبط
نطاق القياس	من ٣٢,٠٠ درجة مئوية إلى ٤٣,٠٠ درجة مئوية
الدقة المختبرية	$\pm 0,1$ درجة مئوية
التكرار السريري	$\geq 0,3$ درجة مئوية
الدقة للاختبار السريري	$\geq 0,3$ درجة مئوية
دقة العرض	$\pm 0,1$ درجة مئوية
استدعاء الذاكرة	استدعاء قياس واحد
تنبيه ارتفاع درجة الحرارة	$\leq 37,5$ درجة مئوية
أبعاد الميزان الحراري	١٣٠ مم × ١١ مم × ٧ مم
أبعاد صندوق الشحن	١٥٧ مم × ٣٧ مم × ١٩ مم
وزن الميزان الحراري	حوالي ٥٥,٥ غرام
وزن صندوق الشحن	حوالي ٥٣ غرام (بدون بطاريات)
بطارية الميزان الحراري	بطارية ليثيوم أيون ٣,٧ فولت تيار مستمر، ٢٠ مللي أمبير/ساعة
بطارية صندوق الشحن	٣ فولت تيار مستمر، بطاريات AAA
الإغلاق التلقائي	عدم التشغيل خلال ٣ دقائق
عمر المنتج	ضمان دولي مدى الحياة
زمن الاستجابة العابر	> ٦٠ ثانية (من درجة حرارة منخفضة إلى مرتفعة)، غير مطبق من مرتفعة إلى منخفضة
إصدار البرنامج	A.01
المعايير	المنتج مصنوع وفقاً لمعيار ISO ٨٠٦١-٢-٥٦

(١) معدات تعمل بالطاقة الداخلية

(٢) جزء مطبق من النوع BF

(٣) تصنيف IP:

• IP65 (جسم الميزان الحراري)

• IP21 (صندوق الشحن)

(٤) التطهير: كحول طبي بنسبة: ٧٠٪-٨٠٪

(٥) ليس معدات من الفئة AP / APG

محتويات التسليم

محتويات العبوة:

- ميزان حرارة إلكتروني قابل لإعادة الشحن ١ ×
- صندوق شحن ١ ×
- دليل الاستخدام ١ ×
- بطاقة الضمان ١ ×

احتياطات السلامة

تم تضمين علامات ورموز التحذير لضمان الاستخدام الآمن والسليم لهذا المنتج وللمنع الإصابات لك وللآخرين.

- راجع الجدول أدناه للحصول على وصف علامات ورموز التحذير.

تحذير 	يشير إلى احتمالية الإصابة الشخصية في حالة الاستخدام غير السليم.
ملاحظة 	يشير إلى احتمالية الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية في حالة الاستخدام غير السليم.
تشمل الأضرار المادية الأضرار التي تلحق بالملوكات المنزلية، الحيوانات الأليفة، إلخ.	

شرح العلامات أو الرموز

قد تظهر الرموز التالية في الدليل، ميزان الحرارة الإلكتروني القابل لإعادة الشحن AHG-372، وملحقاته.

المنع يشير إلى الأفعال الممنوعة. يمكن التعبير عن التعليمات المحددة بالكلمات أو الأشكال داخل العلامة أو بجانبها. يُشار إلى المنع العام بالرمز الموجود على اليسار.	
يجب الالتزام يشير إلى الأفعال الإلزامية. يمكن التعبير عن التعليمات المحددة بالكلمات أو الأشكال داخل العلامة أو بجانبها. يُشار إلى الالتزام العام بالرمز الموجود على اليسار.	

قد تظهر الرموز التالية على العبوة وفي تعليمات الاستخدام هذه.

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	رقم الكتالوج		جزء مطبق من النوع BF
	احفظ جافاً		احفظ بعيداً عن أشعة الشمس
	رقم الدفعة		الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي
	جهاز طبي		لا تُدحرج
	الوضعية العمودية الصحيحة		هش، تعامل بحذر
	الشركة المصنعة		تاريخ التصنيع
	تحذير، راجع الوثائق المرفقة		حدود درجة الحرارة
	علامة CE: تشير إلى الامتثال لتشريع الاتحاد الأوروبي ٢٠١٧/٧٤٥.		الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين
	راجع تعليمات الاستخدام	IP65	محكم ضد الغبار ومحمي ضد نفائات الماء.
IP21	محمي ضد الأجسام الصلبة الغريبة بقطر ١٢,٥ مم وأكبر؛ الحماية ضد قطرات الماء المتساقطة عمودياً.		
UDI قالب  (٠١) تعريف الجهاز (DI) (١٧) تاريخ الانتهاء (١١) تاريخ الإنتاج (١٠) رقم الدفعة (٢١) الرقم التسلسلي			

التخلص السليم من الأجهزة الكهربائية

لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية كنفايات بلدية غير مفروزة. بدلاً من ذلك، استخدم مرافق التجميع المنفصلة. اتصل بالحكومة المحلية أو السلطات للحصول على معلومات حول أنظمة التجميع المتاحة.



المخاطر البيئية للتخلص غير السليم:

- الأجهزة الكهربائية التي يتم التخلص منها فى مكبات النفايات أو الأراضى المهجورة قد تطلق مواد خطيرة فى المياه الجوفية.
- يمكن أن تدخل هذه المواد إلى السلسلة الغذائية، مما يشكل مخاطر على الصحة والرفاهية.
- التخلص السليم يضمن حماية البيئة والسلامة العامة.

⚠ تحذيرات!

- لا تستخدم الميزان الحرارى فى درجات حرارة قصوى (أقل من ٥ درجات مئوية أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية) أو رطوبة قصوى (أقل من ١٥% رطوبة نسبية أو أعلى من ٨٠% رطوبة نسبية). قد يؤدي عدم الالتزام إلى قياسات غير دقيقة.
- لا تخزن الميزان الحرارى فى درجات حرارة قصوى (أقل من -٢٠ درجة مئوية أو أعلى من ٥٥ درجة مئوية) أو رطوبة قصوى (أقل من ١٥% رطوبة نسبية أو أعلى من ٩٣% رطوبة نسبية). التخزين غير السليم قد يؤثر على الدقة والأداء.
- إذا كان مسبار درجة الحرارة تالفاً أو أصبح مفكوكاً، توقف عن استخدام الجهاز. يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.
- لا تعتمد فقط على نتائج القياس للتشخيص الذاتى أو العلاج. اتبع دائماً نصيحة طبيبك. التشخيص الذاتى قد يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.
- قم بتنظيف مسبار درجة الحرارة بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم ورق التواليت أو المناشف الورقية، لأنها قد تخدش السطح وتؤثر على الدقة.
- قم بتركيب البطارية بشكل صحيح وفقاً لدليل المستخدم. التركيب غير الصحيح قد يسبب ارتفاع الحرارة أو التلف.
- لا تغمر الميزان الحرارى فى الماء أو أى سائل. هذا الجهاز ليس مقاوماً للماء.
- تأكد من أن الجهاز يعمل بأمان وفى حالة جيدة قبل الاستخدام.

⚠ تحذيرات!

- أبقى الهواتف المحمولة بعيدة عن الميزان الحرارى أثناء الاستخدام.
- قد تتداخل معدات الاتصالات اللاسلكية المحمولة مع الأجهزة الطبية، مما يسبب عدم الدقة.
- مسبار درجة الحرارة متين، ولكن تعامل معه بحذر.
- إذا تضرر، توقف عن الاستخدام فورًا وارجع إلى بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.
- لا تعدل الميزان الحرارى دون إذن من الشركة المصنعة.
- التعديلات غير المصرح بها قد تعرض السلامة والدقة للخطر.
- هذا الجهاز غير قابل للإصلاح ولا يحتوى على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها.
- إذا حدثت مشكلات، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.
- لا يتطلب المعايرة.
- إذا حدثت مشكلات، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.
- إذا تم تعديل هذا الجهاز، يجب اختباره وفحصه بشكل احترافى قبل الاستخدام الإضافى.
- إذا حدثت أى مشكلات، يرجى مراجعة بطاقة الضمان للحصول على الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الميزان الحرارى إذا كان لديك جهاز طبي مزروع (مثل جهاز تنظيم ضربات القلب).
- المغناطيس المدمج قد يسبب أعطالاً.
- يجب ألا يلمس المشغل كلاً من الميزان الحرارى والمريض فى وقت واحد.
- احتفظ بالميزان الحرارى بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا تم ابتلاع البطارية أو الغشاء الواقى عن طريق الخطأ، استشر طبيباً على الفور.
- لا ترم البطاريات فى النار.
- البطاريات قد تنفجر إذا تعرضت للحرارة العالية.

التوصيات

- استخدم هذا الجهاز فقط للغرض المقصود منه.
- يمكن للمرضى تشغيل الجهاز وصيانتهم حسب الحاجة.
- يجب على الأطفال دون سن ١١ عامًا استخدام هذا الجهاز تحت إشراف شخص بالغ.
- لا تعرض المنتج للمذيبات الكيميائية أو أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- تجنب إسقاط الجهاز أو الدوس عليه أو تعريضه للاهتزازات أو الصدمات.

تعليمات السلامة الهامة

هذا الميزان الحرارى مخصص فقط لقياس درجة حرارة جسم الإنسان كما هو موضح فى هذا الدليل. أى استخدام خارج الغرض المقصود قد يؤدى إلى قياسات غير دقيقة، أو خلل فى الجهاز، أو إصابة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام أو التطبيق غير الصحيح.

- لا تغمز الميزان الحرارى فى الماء أو أى سوائل أخرى.
- راجع قسم التنظيف والتطهير للحصول على تعليمات التنظيف المناسبة.
- لا تستخدم الميزان الحرارى إذا بدا تالفًا أو إذا لوحظ أى شىء غير عادى.
- لا تفتح الجهاز أو تفككه أو تحاول إصلاحه.
- هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام فى وجود خلاطات التخدير القابلة للاشتعال مع الهواء أو الأكسجين أو أكسيد النيتروز.
- قد يحدث تأثير فسيولوجى يُسمى التضيق الوعائى فى المراحل المبكرة من الحمى، مما يؤدى إلى برودة الجلد وقد ينتج عنه قراءات درجة حرارة أقل.
- إذا كانت نتيجة القياس غير متسقة مع حالة المريض أو منخفضة بشكل غير عادى، كرر القياس كل ١٥ دقيقة. تحقق من النتيجة باستخدام طريقة أخرى لقياس درجة حرارة الجسم الأساسية.
- يحتوى على مكونات حساسة ويجب التعامل معه بحذر. تجنب إسقاطه أو تعريضه للصدمات أو القوة المفرطة.
- احتفظ بالميزان الحرارى بعيدًا عن متناول الأطفال. الأجزاء الصغيرة، مثل غطاء البطارية أو طرف المسبار، قد تشكل خطر الاختناق.

احمِ الميزان الحرارى من:

- درجات الحرارة القصوى
- الصدمات والسقوط
- التلوث والغبار
- أشعة الشمس المباشرة
- الحرارة والبرد

إذا لم يتم استخدام الميزان الحرارى لفترة طويلة، أزل البطاريات لمنع التسرب أو التلف.

تحذيرات!

- هذا الميزان الحرارى ليس مقاومًا للماء. لا تغمره فى السوائل.
- استخدام هذا الجهاز ليس بديلًا عن استشارة طبيبك. اطلب دائمًا المشورة الطبية المهنية لاتخاذ قرارات التشخيص والعلاج.

تعليمات الاستخدام

ميزان الحرارة AHG-372 (معدات طبية أو نظام طبي) مناسب للاستخدام في المنزل أو بيئات الرعاية الصحية. اتبع هذه التعليمات لضمان التشغيل السليم:

تحذيرات!

- لا تعمل هذا الجهاز بالقرب من معدات الجراحة عالية التردد النشطة أو في غرفة محمية من الترددات الراديوية لنظام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). هذه البيئات تحتوي على اضطرابات كهرومغناطيسية عالية قد تتداخل مع تشغيل الجهاز.
- تجنب استخدام هذا الجهاز بجوار أو مكدياً مع أجهزة أخرى، حيث قد يؤدي ذلك إلى تشغيل غير صحيح. إذا كان هذا الاستخدام ضرورياً، راقب كلا الجهازين للتأكد من أنهما يعملان بشكل طبيعي.
- استخدم فقط الملحقات، والمحولات، والكابلات المحددة أو المقدمة من الشركة المصنعة. استخدام ملحقات غير مصرح بها قد يزيد من الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو يقلل من المناعة الكهرومغناطيسية، مما يؤدي إلى تشغيل غير صحيح.
- حافظ على مسافة لا تقل عن ٣٠ سم (١٢ بوصة) بين معدات الاتصالات اللاسلكية المحمولة (مثل الهواتف المحمولة، والهواتف). عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى تدهور الأداء.

الملحقات واعتبارات الامتثال:

- يجب أن تتوافق الكابلات والملحقات القابلة للاستبدال مع مواصفات الشركة المصنعة لضمان الامتثال للبند ٧ (الانبعاثات) والبند ٨ (المناعة) من معايير التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها.
- استخدم فقط الكابلات المحمية، والمحولات، والملحقات الأخرى المحددة أو المقدمة من الشركة المصنعة.
- قد تشمل المكونات القابلة للاستبدال:
 - العناصر العامة (مثل الكابلات المحمية، مقاومة الحمل المحددة).
 - العناصر المحددة (مثل الملحقات المعتمدة من الشركة المصنعة مع المعدات المحددة أو مراجع النوع).
- إذا تم إجراء أى تعديلات أو تغييرات غير مصرح بها، يجب أن يخضع الجهاز للفحص والاختبار المناسبين لضمان التشغيل الآمن.

١. تعليمات السلامة والأداء

اتبع جميع الإرشادات اللازمة للحفاظ على السلامة الأساسية والأداء الأساسي فيما يتعلق بالاضطرابات الكهرومغناطيسية طوال العمر الافتراضي المتوقع لميزان الحرارة.

٢. الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة

يتوافق هذا الجهاز مع معايير الانبعاثات الكهرومغناطيسية والمناعة ذات الصلة.

الجدول ١

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة – الانبعاثات الكهرومغناطيسية	
الاختبار	الامتثال
انبعاثات الترددات الراديوية CISPR 11	المجموعة ١
انبعاثات الترددات الراديوية CISPR 11	الفئة B
انبعاثات التوافقيات IEC 60001-2-3	غير قابل للتطبيق
تقلبات الجهد/انبعاثات الوميض IEC 60001-2-3	غير قابل للتطبيق

الجدول ٢

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - المناعة الكهرومغناطيسية		
اختبار المناعة	مستوى اختبار IEC 60001-1-2	مستوى الامتثال
التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) IEC 61000-4-5	٨± كيلو فولت تلامس ٢± كيلو فولت، ٤± كيلو فولت، ٨± كيلو فولت، ١٥± كيلو فولت هواء	٨± كيلو فولت تلامس ٢± كيلو فولت، ٤± كيلو فولت، ٨± كيلو فولت، ١٥± كيلو فولت هواء
التبضات الكهربائية السريعة/الانفجار (ESD) IEC 61000-4-5	خطوط إمداد الطاقة: ٢± كيلو فولت خطوط الإدخال/الإخراج: ١± كيلو فولت	خطوط إمداد الطاقة: ٢± كيلو فولت
التيار العابر IEC 61000-4-5	من خط إلى خط: ١± كيلو فولت من خط إلى الأرض: ٢± كيلو فولت تردد التكرار ١٠٠ كيلو هرتز	من خط إلى خط: ١± كيلو فولت تردد التكرار ١٠٠ كيلو هرتز
الانخفاضات القصيرة في الجهد، الانقطاعات القصيرة، والتغيرات في الجهد على خطوط إمداد الطاقة IEC 61000-4-11	٠.٥٪ دورة عند ٠.٤٥، ٠.٩٠، ١.٣٥، ١.٨٠، ٠.٢٢٥، ٠.٢٧٠، ٠.٣١٥ ١٪ دورة و ٧٠٪ ٣٠/٢٥ دورة أحادي الطور: عند ٣٠٠٪ دورة	٠.٥٪ دورة عند ٠.٤٥، ٠.٩٠، ١.٣٥، ١.٨٠، ٠.٢٢٥، ٠.٢٧٠، ٠.٣١٥ ١٪ دورة و ٧٠٪ ٣٠/٢٥ دورة أحادي الطور: عند ٣٠٠٪ دورة
المجال المغناطيسي لتردد الطاقة IEC 61000-4-8	٣٠ أمبير/متر ٥٠ هرتز/٦٠ هرتز	٣٠ أمبير/متر ٥٠ هرتز/٦٠ هرتز
الترددات الراديوية الموجهة IEC 61000-4-6	من ١٥٠ كيلو هرتز إلى ٨٠ ميغا هرتز: ٣ فولت جذر متوسط التريبع ٦ فولت جذر متوسط التريبع (في نطاقات ISM وأجهزة الراديو الهواة) ٧٠٪ تعديل السعة عند ١ كيلو هرتز	من ١٥٠ كيلو هرتز إلى ٨٠ ميغا هرتز: ٣ فولت جذر متوسط التريبع ٦ فولت جذر متوسط التريبع (في نطاقات ISM وأجهزة الراديو الهواة) ٧٠٪ تعديل السعة عند ١ كيلو هرتز
الترددات الراديوية الموجهة IEC 61000-4-3	١٠ فولت/متر من ٨٠ ميغا هرتز إلى ٢.٧ جيجا هرتز ٨٠٪ تعديل السعة عند ١ كيلو هرتز	١٠ فولت/متر من ٨٠ ميغا هرتز إلى ٢.٧ جيجا هرتز ٨٠٪ تعديل السعة عند ١ كيلو هرتز
الترددات الراديوية الموجهة IEC 61000-4-39	٣٠ كيلو هرتز: ٨ أمبير/متر ١٣٤.٢ كيلو هرتز: ٦٥ أمبير/متر ١٣.٥٦ ميغا هرتز: ٧.٥ أمبير/متر	٣٠ كيلو هرتز: ٨ أمبير/متر ١٣٤.٢ كيلو هرتز: ٦٥ أمبير/متر ١٣.٥٦ ميغا هرتز: ٧.٥ أمبير/متر
ملاحظة: UT هو جهد التيار المتردد قبل تطبيق مستوى الاختبار.		

الجدول ٣

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - المناعة المغناطيسية						
مستوى اختبار المناعة (فولت/متر)	المسافة (متر)	الطاقة (واط)	التعديل	الخدمة	النطاق (ميغا هرتز)	تردد الاختبار (ميغا هرتز)
٢٧	٠.٣	١.٨	تعديل النبض ١٨ كيلو هرتز	TETRA 400	٣٨٠- ٣٩٠	٣٨٥
٢٨	٠.٣	٢	FM بانحراف ٥± كيلو هرتز، موجة جيبية ١ كيلو هرتز	GMRS 460, FRS 460	٣٨٠- ٣٩٠	٤٥٠
٩	٠.٣	٠.٢	تعديل النبض ٢١٧ كيلو هرتز	LTE Band 13,17	٧٠٤- ٧٨٧	٧١٠
						٧٤٥
						٧٨٠
٢٨	٠.٣	٢	تعديل النبض ١٨ كيلو هرتز	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	٨٠٠- ٩٦٠	٨١٠
						٨٧٠
						٩٣٠
٢٨	٠.٣	٢	تعديل النبض ٢١٧ كيلو هرتز	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1, 3, 4, 25, UMTS	١٧٠٠- ١٩٩٠	١٧٢٠
						١٨٤٥
						١٩٧٠
٢٧	٠.٣	١.٨	تعديل النبض ٢١٧ كيلو هرتز	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	٢٤٠٠- ٢٥٧٠	٢٤٥٠
٩	٠.٣	٠.٢	تعديل النبض ٢١٧ كيلو هرتز	WLAN 802.11 a/n	٥١٠٠- ٥٨٠٠	٥٢٤٠
						٥٥٠٠
						٥٧٨٥

الترددات الراديوية المشعة 4-3-IEC61000 (مواصفات الاختبار لمساحة منفذ الهيكل ضد معدات الاتصالات اللاسلكية بالترددات الراديوية)

الجدول ٤

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - المناعة المغناطيسية		
تردد الاختبار	التعديل	مستوى اختبار المناعة (أمبير/متر)
٣٠ كيلو هرتز	CW	٨
١٣,٤٢ ميغا هرتز	تعديل النبض ٢,١ كيلو هرتز	٦٥ ^b
١٣,٥٦ ميغا هرتز	تعديل النبض ٥٠ كيلو هرتز	٧,٥ ^b
(a) يجب أن يتم تعديل الناقل باستخدام إشارة موجة مربعة بنسبة دورة تشغيل ٥٠٪. (b) جذر متوسط التربيع (r.m.s)، قبل تطبيق التعديل.		

American Health Gate Co., LLC

الضمان المحدود

الضمان المحدود: تقوم شركة ("AHG") American Health Gate Co., LLC بضمان أن جهاز مراقبة الجلوكوز فى الدم AHG-372 (يُشار إليه بـ"المنتج") المشتري من AHG أو إحدى الشركات التابعة لـ AHG أو أحد موزعي AHG المعتمدين فى نقطة البيع الأصلية، خال من عيوب التصنيع فى جودة التصنيع والمواد طوال حياة المشتري الأصلية بالتجزئة (يُشار إليه بـ"المشتري") ابتداءً من تاريخ الشراء الأصلي (يُشار إليه بـ"فترة الضمان").

غير قابل للتحويل: هذا الضمان المحدود مخصص للمشتري فقط ولا يمكن نقله إلى أى شخص أو كيان آخر.

الاستثناءات من تغطية الضمان: لا تتحمل AHG أى التزام بموجب هذا الضمان المحدود فيما يتعلق بأى عيب أو تلف فى المنتج ناتج عن سوء استخدام أو استخدام غير صحيح أو سوء معاملة للمنتج. لا ينطبق الضمان المحدود على أى عيب أو تلف يُدعى أنه ناتج عن أو ناجم عن أى مما يلي، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- عدم استخدام المنتج وفقاً لتعليمات أو توصيات AHG؛
- عدم تجميع أو تركيب المنتج وفقاً لتعليمات AHG؛
- تلف الغطاء الخارجى؛
- تلف حدث أثناء الشحن؛
- إزالة أو تشويه أو تغيير الرقم التسلسلى / ختم مراقبة الجودة؛
- عناصر الصيانة الروتينية، والتآكل الطبيعى، والتدهور الجمالى، أو الأجزاء الكهربائية التى تضررت نتيجة تقلبات التيار الكهربائى؛
- إصلاحات الضمان التى قام بها أى شخص غير AHG أو موزع معتمد ومؤهل من AHG أو من ينوب عنه؛
- التلف أو فقدان الناتج عن أحداث طبيعية، أو التخريب، أو السرقة، أو الحرب أو أحداث أخرى خارج سيطرة AHG؛ أو
- استنفاد أو نفاذ الأجزاء القابلة للاستهلاك فى المنتج، بما فى ذلك [صندوق الشحن، لبطاريات، والعبوات].

إجراءات الضمان: فى حال ظهور عيوب فى المواد و/أو جودة التصنيع فى المنتج أثناء الاستخدام والخدمة اليومية، يتعين على المشتري: (١) تقديم مطالبة ضمان عبر الإنترنت على الموقع <https://americanhealthgate.com/contact-us> أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، (٢) تقديم المعلومات المطلوبة فى بطاقة الضمان المرفقة مع دليل التعليمات الخاص بالمنتج وإرسال بطاقة الضمان إلى AHG أو إلى موزع معتمد من AHG عبر البريد، أو (٣) تقديم المنتج

إلى AHG أو إلى وكيل أو موزع أو موزع معتمد من AHG حيث تم شراء المنتج (يُشار إليه بـ "مكان الشراء"). في حال تسليم المشتري للمنتج المعيب إلى مكان الشراء، يقوم وكيل معتمد في مكان الشراء بفحص المنتج لتحديد أهليته للاستبدال وفقاً لشروط هذا الضمان المحدود. يقوم الوكيل المعتمد في مكان الشراء بتقديم مطالبة إلى AHG لتأكيد أن العيوب في المنتج مغطاة بموجب هذا الضمان المحدود. عند التأكد من أن العيوب في المنتج مغطاة بشروط هذا الضمان المحدود، يكون تعويض المشتري على شكل استبدال المنتج. يتحمل المشتري وحده تكاليف الشحن والتغليف اللازمة لإعادة المنتج إلى AHG أو إلى موزع معتمد من AHG.

التعويض: العلاج الوحيد والحصري المتاح للمشتري بموجب هذا الضمان المحدود في حالة وجود عيب في المواد أو جودة التصنيع في المنتج أو أي جزء أو مكون منه خلال فترة الضمان هو أن تقوم AHG أو أحد موزعي AHG المعتمدين باستبدال المنتج. في حالة أن طراز المنتج المحدد قد تم إيقاف إنتاجه ولم يعد بالإمكان استبداله بنفس الطراز فإن AHG أو أحد موزعي AHG المعتمدين سيقوم باستبدال المنتج المعيب بأحدث طراز متاح من نفس المنتج. يُعتبر هذا الضمان المحدود لاغياً وباطلاً إذا قام بإجراء الإصلاحات أشخاص غير مخولين من قبل AHG أو إذا لم تُستخدم قطع غيار AHG الأصلية في إصلاح المنتج المعيب. لن يُعتبر هذا العلاج الحصري قد فشل في تحقيق غرضه الأساسي طالما بذلت AHG جهوداً معقولة لاستبدال الأجزاء المعيبة.

حدود المسؤولية: يُمنح هذا الضمان من قبل AHG بدلاً من جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك. لا يوجد أي ضمان بالصلاحية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو لاستخدام معين، سواء كان صريحاً أو ضمناً بموجب القانون أو سير التعامل أو سير الأداء أو العرف التجاري أو غير ذلك.

استبدال المنتج هو العلاج الحصري المتاح. لا تتحمل AHG المسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر عن الأضرار التبعية أو العرضية أو الخاصة أو النموذجية أو غير المباشرة أو العقابية، بما في ذلك - دون حصر - الإصابات الشخصية، أو الوفاة، أو تلف الممتلكات، أو خسارة الأرباح، أو تكاليف العمالة، أو أي ضرر مالي آخر، سواء كان ذلك ناتجاً عن أي عيب أو تأخير أو عدم تسليم أو عدم أداء أو سحب من السوق أو إخلال من AHG أو لأي سبب آخر. يتم التنازل عن جميع المطالبات في الضرر التقصيري أو المسؤولية المطلقّة أو فشل تحقيق الغرض الأساسي واستبعادها، بما في ذلك مطالبات الإهمال من جانب AHG. لا تتحمل AHG المسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر بموجب نظرية الضرر التقصيري أو المسؤولية المطلقة أو أي نظرية قانونية أو إنصافية أخرى عن أي عيب مزعوم في تصميم أو تصنيع المنتج أو عن الإغفال أو عدم كفاية أي تحذير مزعوم. باستثناء الضمان المحدود الوارد هنا، يقبل المشتري المنتج "على حالته" مع جميع العيوب ويتحمل مخاطر الخسارة الناتجة عن أي عيب أو عدم مطابقة. يتنازل المشتري ويعفى ويسرى AHG من جميع المطالبات والدعاوى

أو الحقوق في الدعوى والمسؤولية عن أى عيوب خفية أو ظاهرة، قانونية أو عرفية، سواء كانت واضحة أو غير معروفة، سهلة الاكتشاف أو مخفية، إلا كما هو منصوص عليه صراحة في الضمان. تحت أى ظرف من الظروف لا تتجاوز مسؤولية AHG عن أى عيب في المنتجات - سواء استندت إلى العقد أو الضرر التقصيري أو الضمان أو المسؤولية المطلقة أو أى نظرية أخرى - سعر شراء المنتج المعيب. لا يوجد مستفيدون من الغير لهذا الاتفاق.

يقر المشتري ويعلن أنه قد قرأ وفهم جميع الشروط ويوافق على الالتزام بها، وأن استلام المشتري للضمان والمنتج وأي دفع مقابل ذلك يعنى أن المشتري قد وافق طوعاً وعن علم على جميع الشروط، بما في ذلك التنازلات والحدود الواردة هنا.

الحقوق القانونية: في بعض الدول و/أو الولايات، لا يُسمح بالحد من مدة سريان الضمان الضمني أو استبعاد أو تحديد الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك قد لا تنطبق الحدود المذكورة أعلاه على المشتري. يمنحك هذا الضمان المحدود، أيها المشتري، حقوقاً قانونية محددة، وقد تختلف هذه الحقوق من دولة إلى أخرى و/أو من ولاية إلى أخرى. يُفهم أن هذا الضمان المحدود هو الاتفاق الحصري بين الأطراف فيما يتعلق بموضوع هذا الضمان. لا يُخول أى موظف أو ممثل لـ AHG بتقديم أى ضمان إضافي غير الضمانات الواردة في هذا الاتفاق.

**American
Health
Gate**

بطاقة ضمان

American Health Gate

يرجى إكمال بطاقة الضمان المرفقة مع هذا المنتج وإرسالها بالبريد إلى:

American Health Gate LLC

٤٥٠ ألاسكان واى إس، جناح ٢٠٠، سياتل، واشنطن ٩٨١٠٤، الولايات المتحدة الأمريكية

دم عملاء AHG: ٣٤٧٩ ٨٨١ ٨٨٨ ١ +

www.americanhealthgate.com

اسم العميل: _____

رقم الهاتف: _____

عنوان البريد الإلكتروني: _____

مكان الشراء: _____

تاريخ الشراء: _____

الطراز: _____ رقم الدفعة: _____



المكتب الرئيسي:

American Health Gate LLC

العنوان: ٤٥٠ ألاسكان واى إس.، جناح ٢٠٠، سياتل، واشنطن ٩٨١٠٤.

الولايات المتحدة الأمريكية

www.americanhealthgate.com